



# AccuFab-CEL 3Dプリンター クイックスタートガイド

## 開梱と設置


01

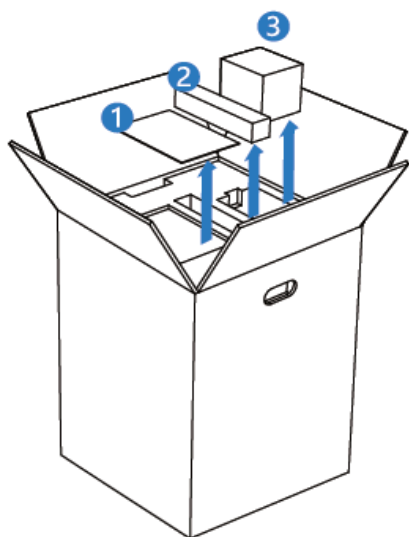


パッケージを開き、  
①英文取説説明書  
②電源ケーブル  
③セラミックビルドプラットフォーム（小）  
を取り出します。

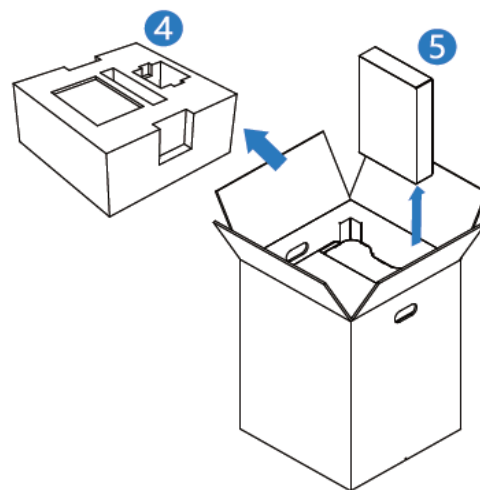


④発砲スチロール  
を外して、本体背面に入っている  
⑤スペアレジジンタンク  
を取り出します。

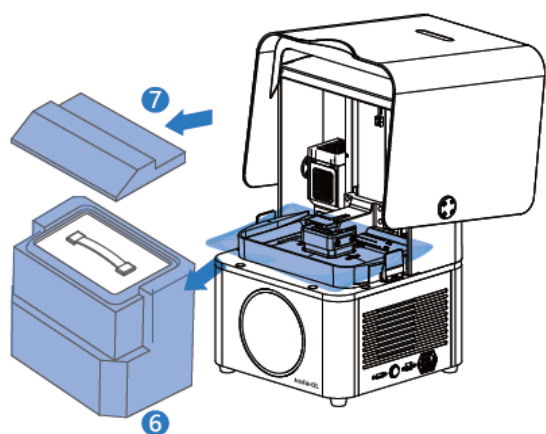


パッケージからプリンターを取り出し、水平で安定したテーブルなどに置きます。プリンターチャンバードアを開き、内側の固定用発砲スチロール（⑥、⑦）を取り外します。

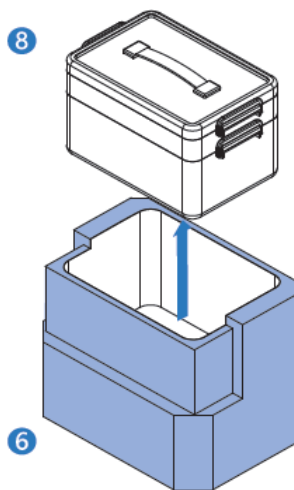


⑥の発砲スチロール内にあるアクセサリーボックスを取り外します。

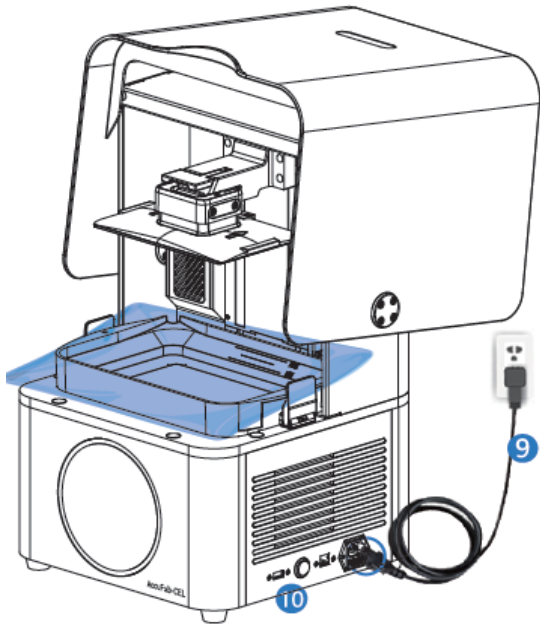

⑨電源ケーブルを本体に接続、コンセントに差し込み、⑩電源ボタンを押します。初回起動時、プラットフォームが自動で最上部まで動きます。プラットフォームが停止したら、レジタンク周辺の保護フィルムを剥がします。

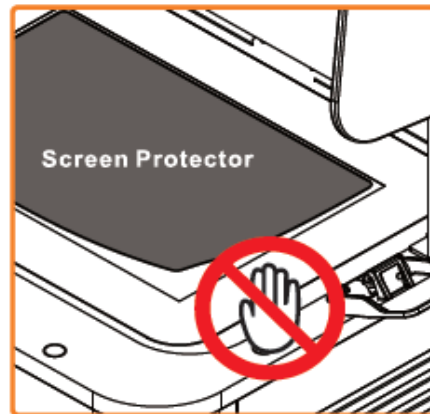


注意: スクリーンプロテクターは剥がさないでください

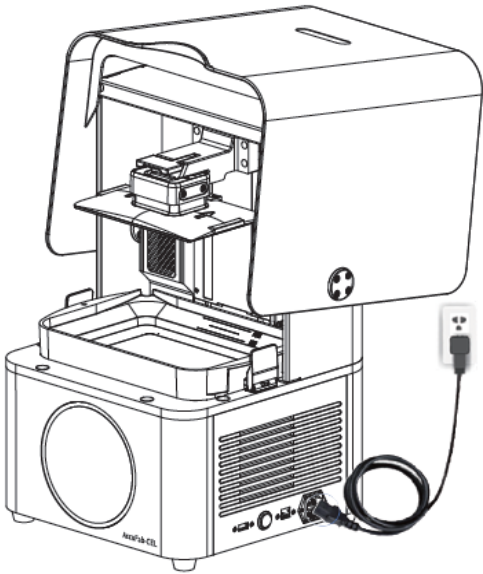


設置が完了しました。

- ・プリント精度は温度と湿度から影響を受けます。最適な環境は温度 $23\pm^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $50\pm 10\%$ です。
- ・ $15^{\circ}\text{C}$ 以下の室温では使用できません。
- ・水平で安定した場所に設置してください。
- ・換気できる場所に設置してください。
- ・凹凸のある場所や、直射日光のあたる場所には設置しないこと。

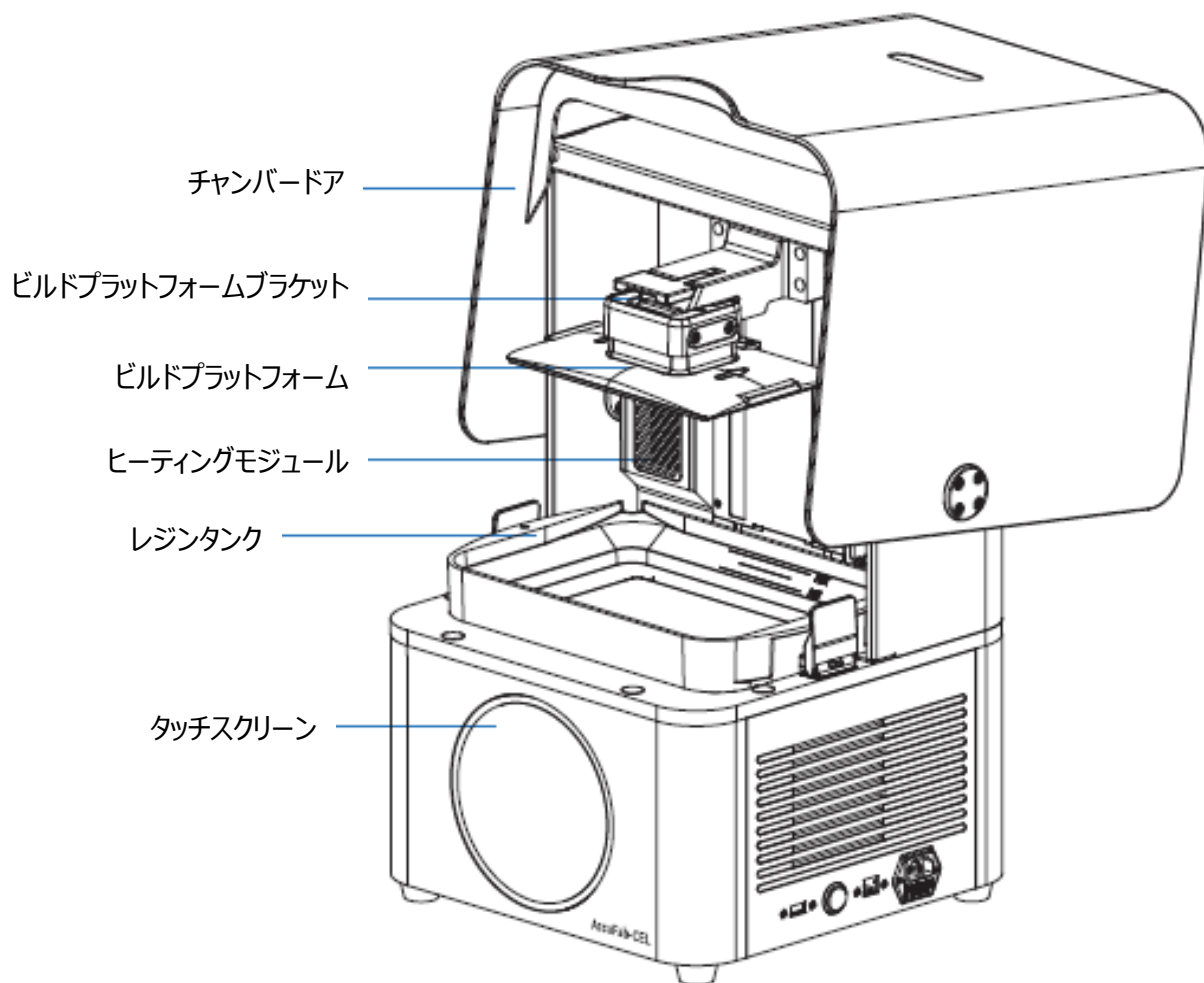

USBポート (Aタイプ)

ネットワークポート

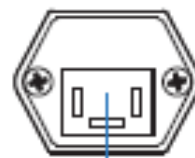

電源ボタン

電源ケーブル接続口



スモールレジタンク



セラミックビルドプラットフォーム(小)



品質認証書



取扱説明書



使い捨てグローブ



USBメモリ



ヘラ



ヘラ



ブラシ



スクレーパー



クリーニングボックス



ボルト



レジタンククリーナー



レンチ



クロス



PETカード



電源ケーブル



ネットワークケーブル

USBメモリ…マニュアルやインストレーター等が保存されています。

ヘラ2種…プリント終了後、プラットフォームから模型を取り外す際に使用します。

ブラシ…模型に付着したレジンを取り除く際に使用します。

スクレーパー…沈殿を防ぐためタンク内のレジン进行を混ぜる際に使用します。


クリーニングボックス…付属品の保管などに使用します。

クロス…プロジェクターレンズ、保護メガネ、レジタンクガラスの拭き取りに使用します。

PETカード…プラットフォームのレベル出し、重合層の除去に使用します。


## レジンタンクへのレジン液の補充

沈殿防止のため、レジンのボトルをよく振ってからタンクに入れます。  
 タンクのMIN目盛り以上、MAX目盛り以下になるように注いでください。  
 プリント中もレジンを補充することができます。


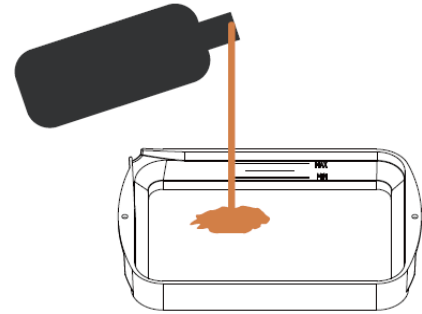


## プリンターのアクティベート

本体の電源を入れるとスクリーンに下記のような画面が表示されます。「Connect」を押してください。

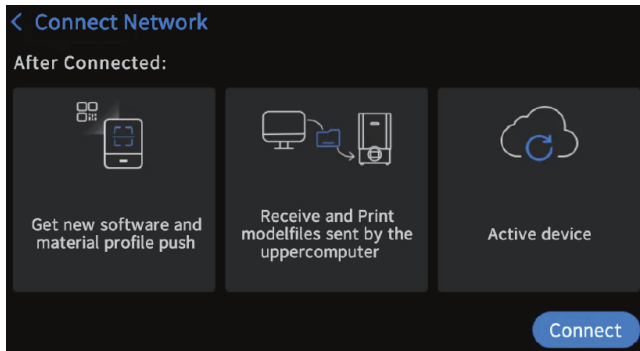


お使いのスマートフォンでスクリーンに表示されたQRコードを読み取ります。

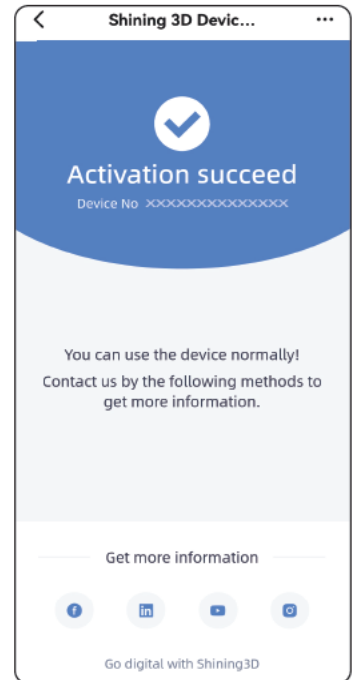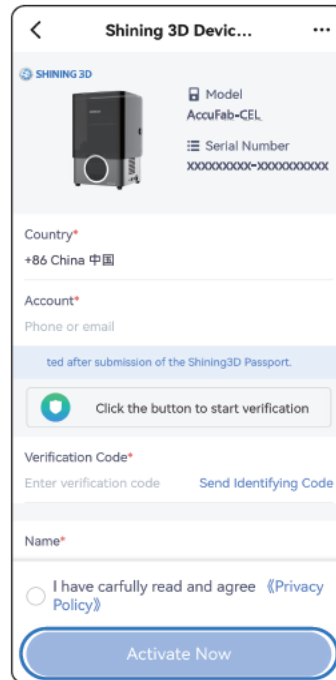


スマートフォンに表示される各項目を入力し、「Activate Now」を押します。

約1分後、スクリーンに「Activate Succeeded」と表示されます。「Next」を押して次に進みます。

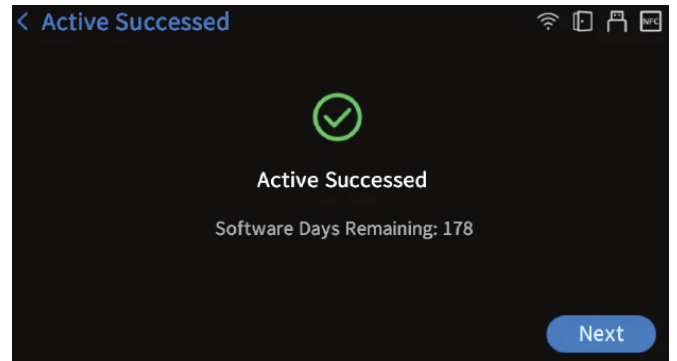


## AccuWare (ソフトウェア) インストール

USBメモリをPCに接続し、保存されている「AccuWare\_3.2.X.XXX\_release\_install.exe」をPCの任意の場所にコピーします。exeファイルを実行し、インストーラーを起動します。インストールが完了したら、「Finish」をクリックしてください。

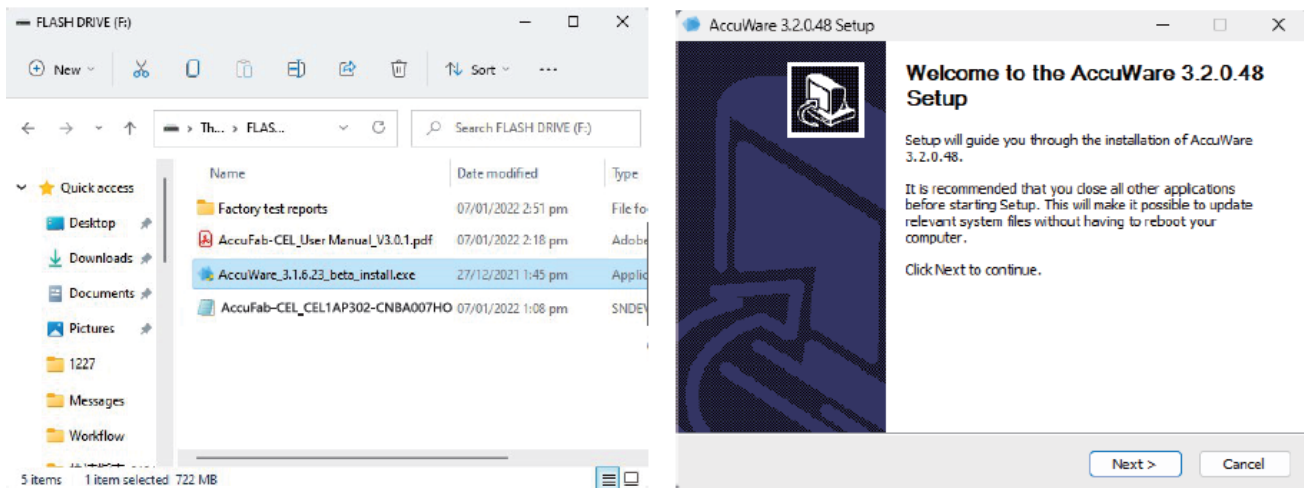



## プリンタープロファイルのインポート

インストールしたAccuWareを起動します。  
USBメモリからsndeVファイルをインポートします。

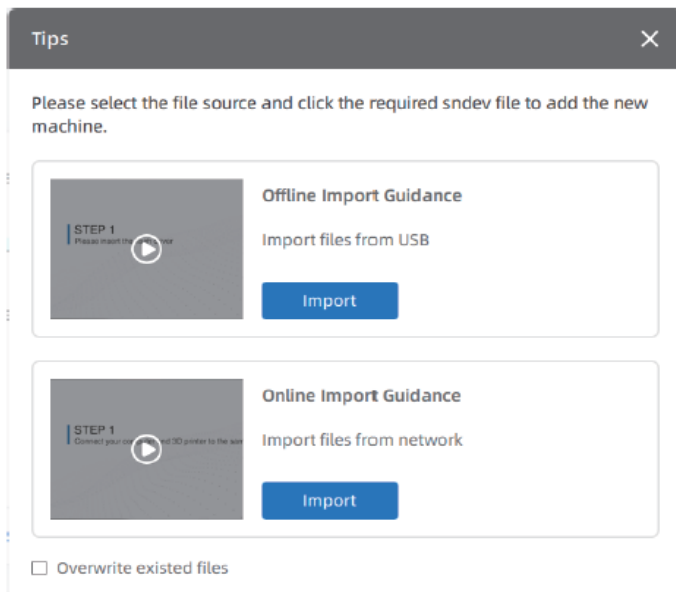


## マテリアルプロファイルのアップデート

AccuWare右上のSettingsアイコン（歯車）から「System Settings」→「Check Update」をクリックし、アップデート状況を確認します。

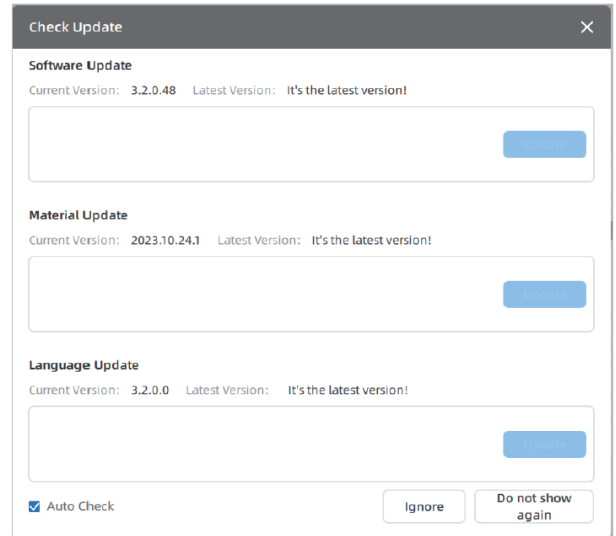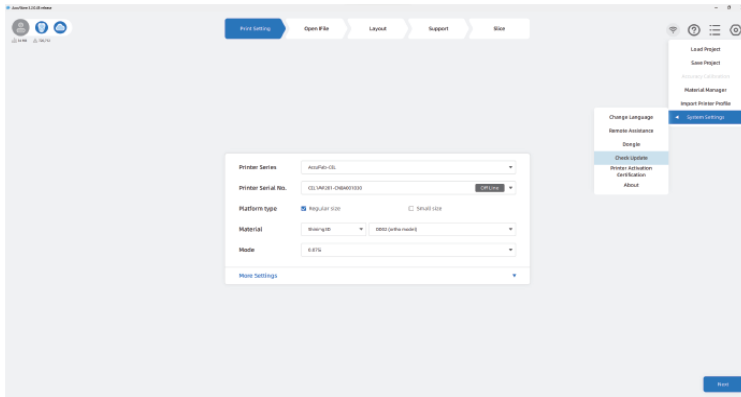

## プリンター設定とデータ選択

プリンター機種名（AccuFab-CEL）、プリンターシリアルナンバー（プリンター本体ラベルに記載）、レジジン名、レイヤー層が正しいことを確認し、「Next」をクリックします。

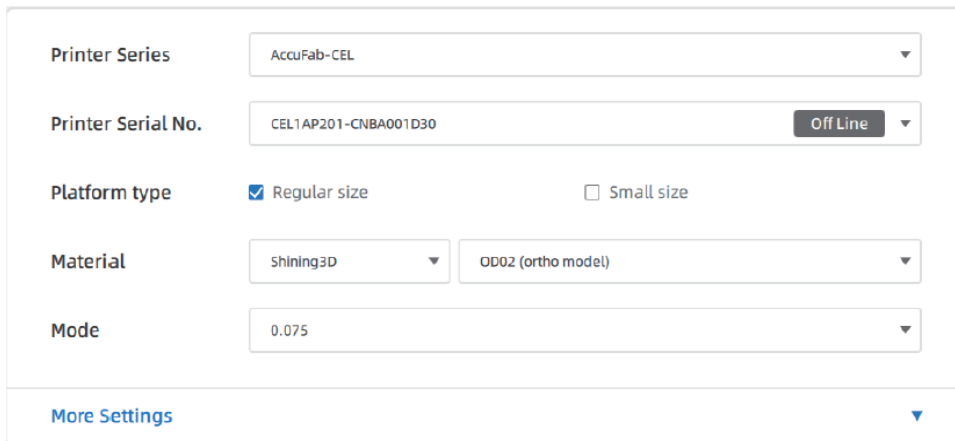


画面左のフォルダアイコンをクリックし、プリントするSTLファイルを選択、「Next」をクリックします。




レイアウトモードでは位置、角度、サイズ、数量を操作できます。詳細は、画面右上の？マークからオンライン版のソフトウェアユーザーマニュアルをご参照ください。レイアウトが完了したら、「Next」をクリックします。



「Auto Support」をクリックすると自動でサポート材を配置します。手でサポート材を配置する場合は、オンライン版のソフトウェアユーザーマニュアルをご参照ください。配置が完了したら、「Next」をクリックします。

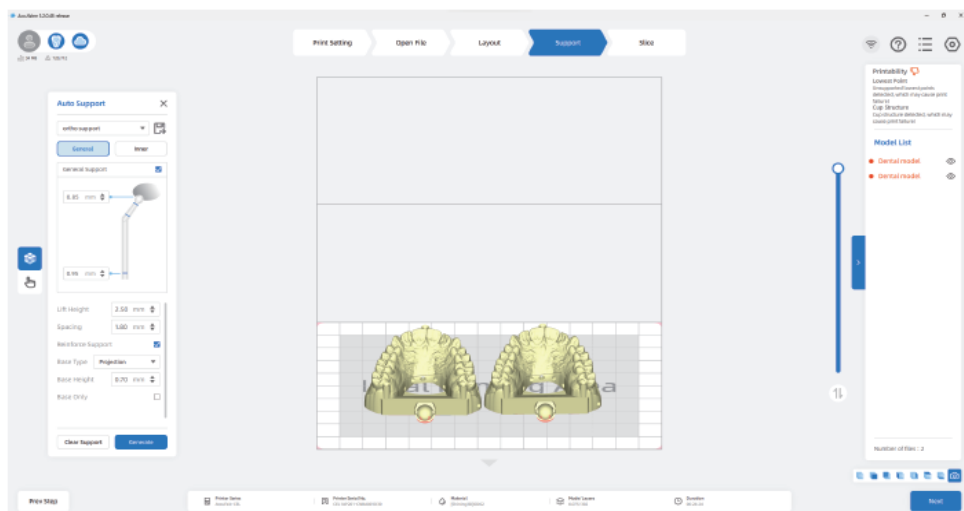


「スライシング」を完了させると、「.fab」データ生成され、USBメモリに保存されます。  
\* オンラインの場合、そのまま、プリンタにデータが転送されます。

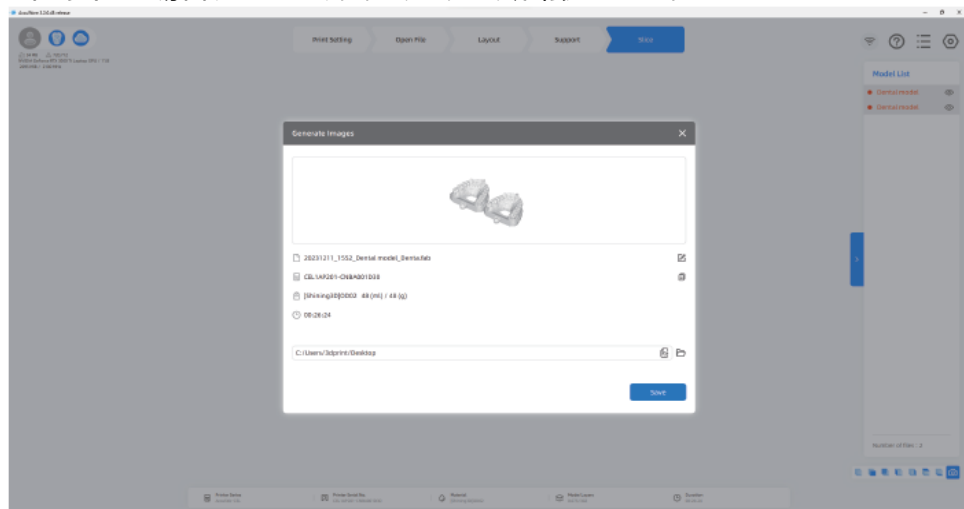




## プリント

プリンター側面にUSBメモリを差し込みます。「Queue」→右下のUSBメモリアイコンをタップします。

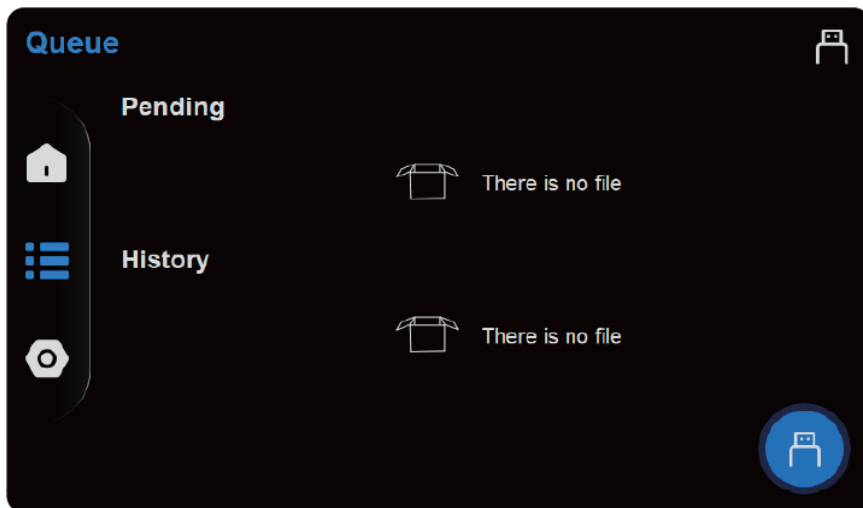


プリントするファイルを選択します。

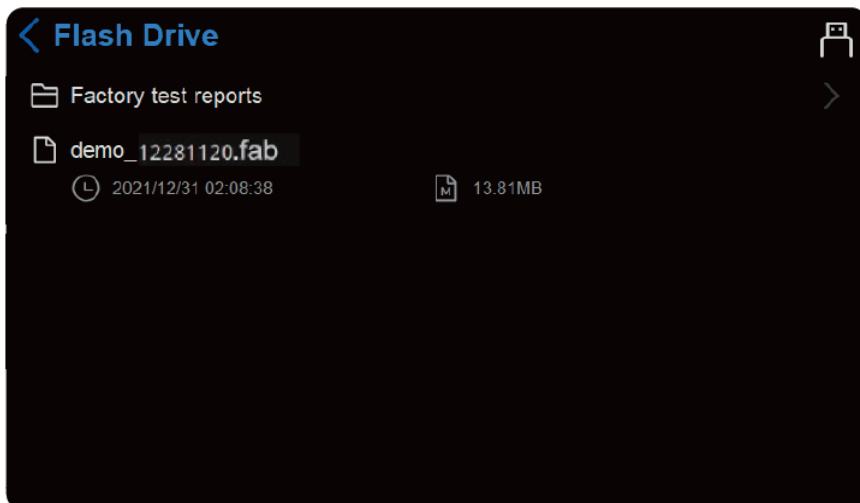

レジンタンクに残余レジンが残っていないか、ライトパスに汚れが付着していないかを確認、沈殿を防ぐためレジンをスクレーパーで混ぜたら「Next」をタップします。



チャンバードアを閉じ、「Next」をタップしてプリントを開始します。

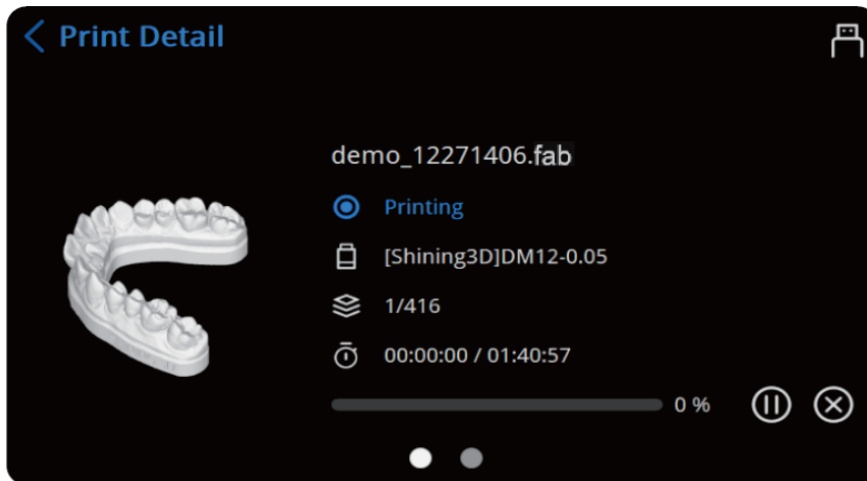

プリントが完了したら、ビルドプラットフォームを取り出して造形物を外します。造形物を洗浄、二次硬化して仕上げます。

製品に関するお問い合わせは…  
株式会社歯愛メディカル  
カスタマーセンター TEL: 0120-979418

製造販売元：株式会社歯愛メディカル  
〒929-0112 石川県能美市福島町に152番地  
TEL: 076-278-8800/FAX: 076-278-8801