



Fabキュア2 クイックスタートガイド

製品概要


01

製品、同梱物の確認

Fabキュア2は、本体は緩衝材によって保護されています。開梱時に必ず製品本体に損傷や同梱物の不足がないかどうかを確認してください。

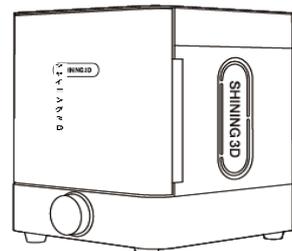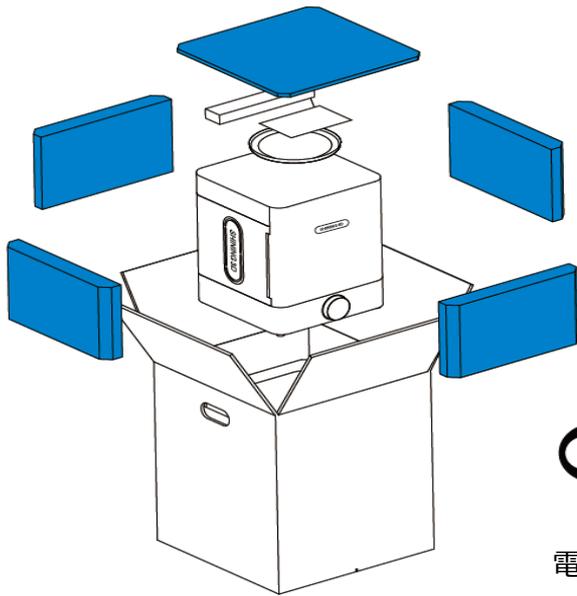

本体

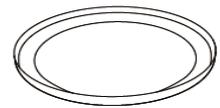

ターンテーブル





電力ケーブル



クイックスタート
ガイド



品質認証書

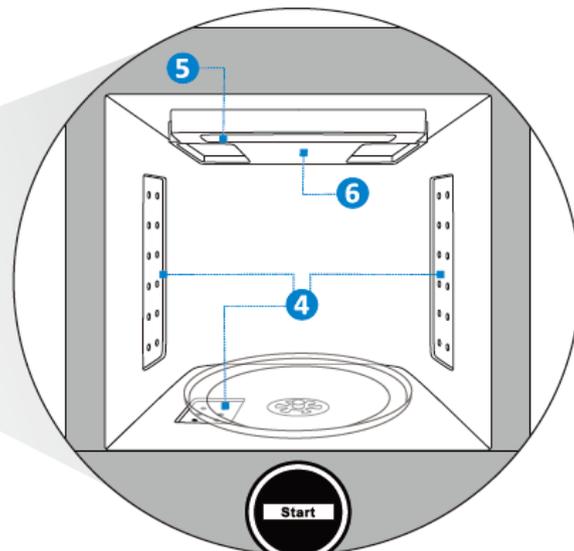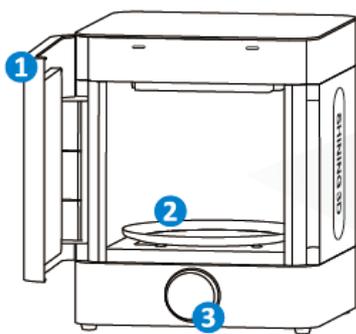



- ①チャンバードア (インターロック機能付き)
- ②ターンテーブル
- ③ノブ

- ④LED
- ⑤ランプ (ドアを開くと自動で点灯します)
- ⑥ヒーティングモジュール



設置

- ・水平で安定した場所に設置してください。
- ・室温10~30℃、湿度30~70%、換気できる場所に設置してください。
- ・凹凸のある場所や、直射日光のあたる場所には設置しないこと。


使用方法

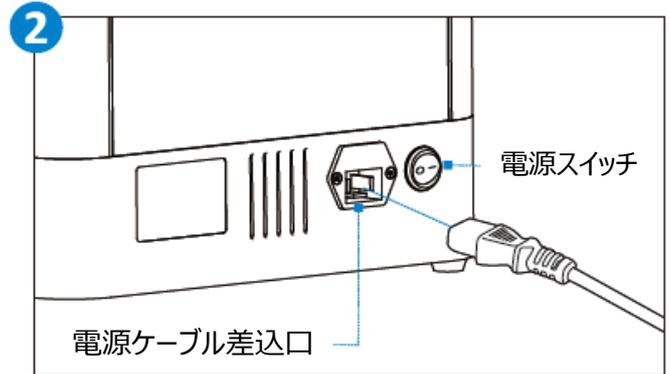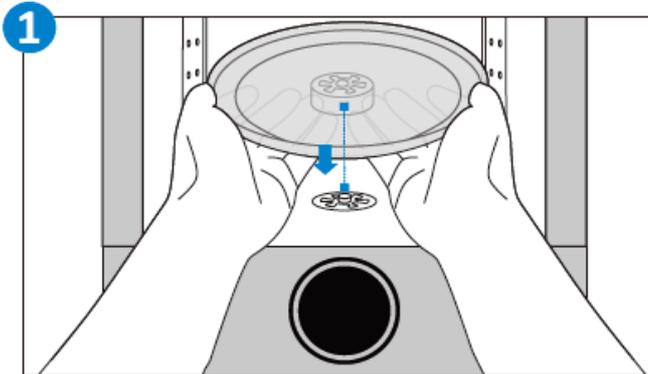

- ①チャンバードアを開き、ターンテーブルを取り付けます。
- ②本体背面の電源ケーブル差込口に電源ケーブルを、コンセントにプラグを接続します。電源スイッチを押して電源をONにしてください。

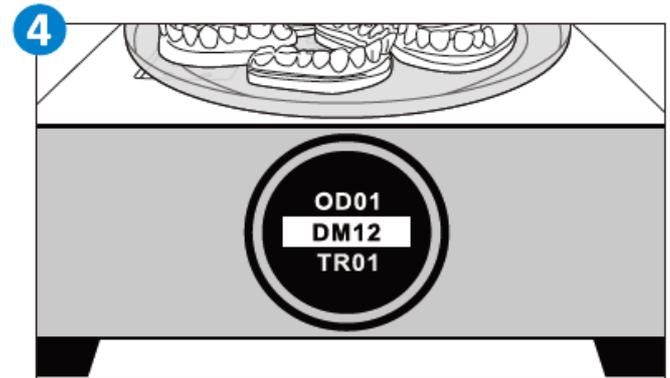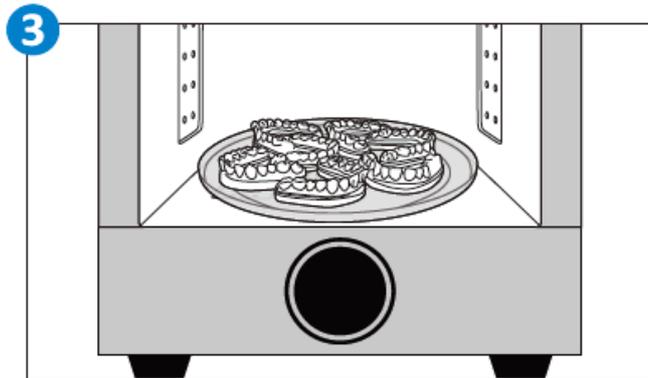

- ③洗浄、乾燥後のプリント造形物をターンテーブルに載せます。ライトを均等に照射するため、造形物同士をなるべく離して、かつ等間隔に配置します。チャンバードアをゆっくりと閉めてください。

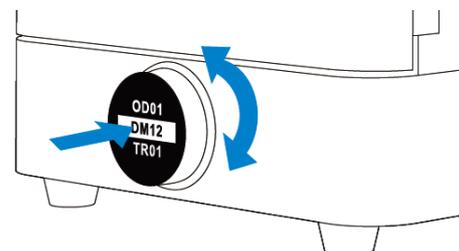

- ④ノブを回してレジンを選択します。照射時間と温度はレジンごとに自動で設定されます。ノブを押し込むと照射を開始します。

照射を中断する場合は、再度ノブを押し込むか、チャンバードアを開いてください。

使用上の注意

・使用中や使用後、チャンバー内やプリント造形物は高温になります。プリント造形物を取り出す際は、必ず保護グローブなどを着用してください。

メンテナンス

- ・設置場所周辺は整理整頓してください。
- ・使用前後は、庫内の表面、ターンテーブル、LEDにレジンが付着していないか、ひび割れなどがないかを目視で確認してください。レジンは付着している場合や汚れがある場合は使用前に取り除いてください。
- ・60℃で2時間使用した場合、15分間のクールタイムが必要です。

トラブルシューティング

エラー内容		原因	解決方法
 ディスプレイに"Plz Close Door!"と表示される	チャンバードアが開いている	チャンバードアを閉めてください	
	チャンバードアセンサーの不具合	チャンバードアの上下の隅にあるインターロックマグネット付近に汚れなどが付着していないか確認し、汚れがある場合は取り除いてください。解消しない場合は販売元にお問合せください。	
 ディスプレイに"Heating Unit Error!"と表示される	ヒータリングモジュールの不具合	本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いた状態でクールダウンさせてください。電源ケーブルを再接続し、電源を入れなおしてください。解消しない場合は販売元にお問合せください。	
	温度センサーの不具合		
 ディスプレイが真っ暗になった	使用中に電源の供給が不安定になった	本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いた状態で3分以上置いてください。電源ケーブルを再接続し、電源を入れなおしてください。解消しない場合は販売元にお問合せください。	
 ネットワークに接続できない	電波が弱い	ルーターの近くに本体を移動させて、ネットワークに再接続してください。	

寸法	290x290x367.5mm
重量	8.2kg
定格電圧	AC 100-240V
消費電力	150W
周波数	50/60Hz
波長域	385~405nm
LED出力	70W
硬化サイズ	最大φ210x180mm
最大温度	60℃
ターンテーブル回転速度	10rpm

製品に関するお問い合わせは…
株式会社歯愛メディカル
カスタマーセンター TEL: 0120-979418

製造販売元：株式会社歯愛メディカル
〒929-0112 石川県能美市福島町に152番地
TEL: 076-278-8800/FAX: 076-278-8801