

DentalDB

3.3 Chemnitz

exocad

exocad v3.3 Chemnitz インストール手順書

目次

exocad v3.3 Chemnitzのご案内	2
①バージョンアップソフトのダウンロード	5
②ダウンロードファイルの解凍	7
③exocadv3.3フォルダの移動	11
④exocadショートカットの作成	12
⑤※重要※exocadフレームワークのインストール	13
⑥my.exocadの登録	16

exocad v3.3 Chemnitzのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、exocad新バージョンv3.3 Chemnitz（2025年版）の配信のご案内をさせていただきます。

案内をよくご確認いただき、本手順書に沿ってお客様でのダウンロード、インストールをお願い致します。

敬具

my.exocad登録について

my.exocadでユーザー情報を登録することにより、ソフトウェアの不正使用から保護する役目があります。

v3.3 Chemnitzソフトウェアを使用するにはmy.exocadへのユーザー登録が必要です。ユーザー登録、ログインを行う際はインターネット接続が必要です。

注意：exocadV3.0Galway以前のバージョンを使用する場合はmy.exocadポータルのログインは必要はありません。

【お詫び】弊社電話回線の混雑について

バージョンアップについての問い合わせが非常に多く寄せられます。このため電話回線が混雑し、お電話が繋がりにくい場合もございます。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。

問合せ先：3DDesignLab 076-259-0811（月曜～金曜の平日のみ）

本案内書、バージョンアップについてのお問い合わせ時間は
10:00～16:00とさせていただきます。

お客様専用exocadv3.3ダウンロードキー

xgf.nu/7ckJy

エックス ジー エフ ドット エヌ ユー スラッシュユ

なな シー ケイ (大)ジェイ ウイ

※ダウンロード期限：2026年2月12日(木)まで

※お客様ダウンロードキーは半角英数で、大文字、小文字を間違えないように入力してください。

※ダウンロード期限内に実施してください。（期限内は何度でもダウンロードできます。）

※期限内にダウンロードできなかった場合弊社までご連絡ください。

exocadv3.3バージョンはインターネット接続が必要です

バージョンアップソフトのダウンロードを行うパソコンはインターネット接続が必要です。また、exocadv3.3バージョンは新しいmy.exocadポータルに登録して使用するためインターネット接続が必要です。

exocadv3.3バージョンソフトウェアの保管について

お客様でダウンロードしたexocadバージョンアップソフトはUSBメモリやDVDメモリなどのメディアに保管することができます。その場合5GB以上の空容量のあるメディアをご用意ください。

①バージョンアップソフトのダウンロード

既にexocadv3.3.7zファイルがダウンロードされている場合はこの作業は不要です。P7へ進んでください。

1.インターネット（ブラウザ）を起動します。

グーグルクローム（※推奨）やEdgeなどの下記アイコンをダブルクリックして起動します。



※推奨
GoogleChrome
(グーグルクローム)

または



※ダウンロード時間が遅くなる場合があります

2.前ページに記載のお客様ダウンロードキー（URL）を入力します。

コピーして貼り付けても構いません。

起動したブラウザに入力してください。入力後エンターキーを押します。

お客様ダウンロードキーを
ここに入力してください




①バージョンアップソフトのダウンロード

3. お客様ダウンロードキーを入力すると下記ページが表示されます
※写真とはデザインが異なる場合がございます



このスライダー
を左ドラッグで
下方に移動させ
ます

4.画面を下方に移動（スクロール）します
スライダーを下方に移動します

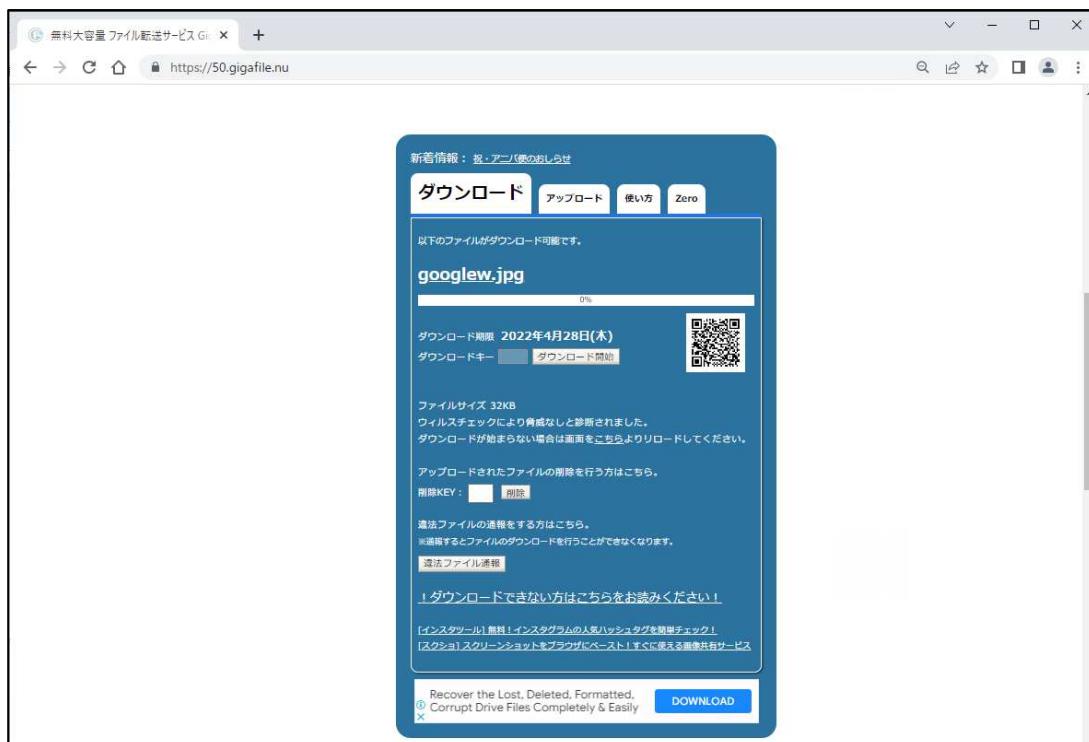

このスライダー
を左ドラッグで
下方に移動させ
ます

①バージョンアップソフトのダウンロード

5. 【ダウンロード開始】ボタンをクリックします

※ダウンロード完了まで20分以上。ネット環境により時間が異なります。


この「ダウンロード開始」
をクリックしてください

✗これではありません →



6. ダウンロード完了を確認する

『完了』の文字を
確認してください

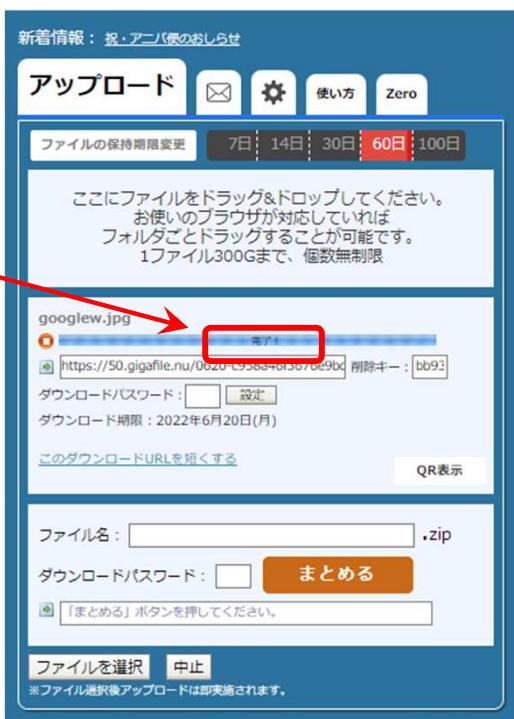

②ダウンロードファイルの解凍

1.ダウンロードフォルダを開く


※以下の方法は一例です。ご存知の方はP9へ進んでください。

※ダウンロード保管場所をダウンロードフォルダ以外に指定している方はそのフォルダを開いてください。

- 1) 画面左下のスタートボタンにカーソルを当て**右クリック**を押します




- 2) 『エクスプローラー』を左クリックします

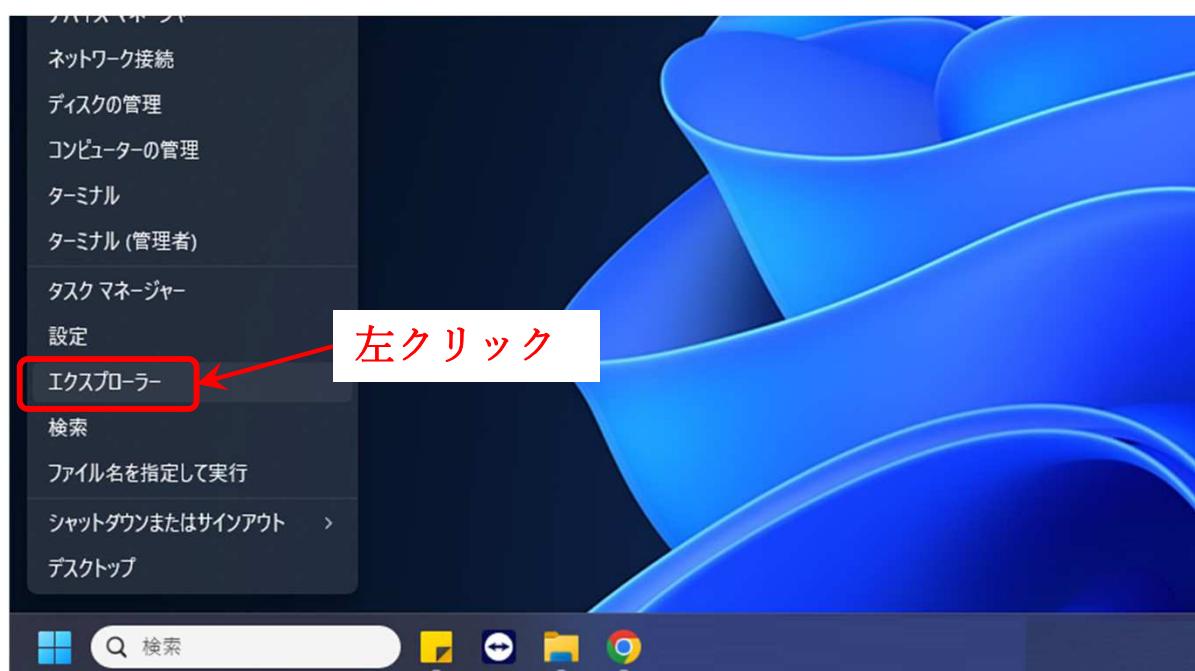


②ダウンロードファイルの解凍

3) 『ダウンロード』をクリックする

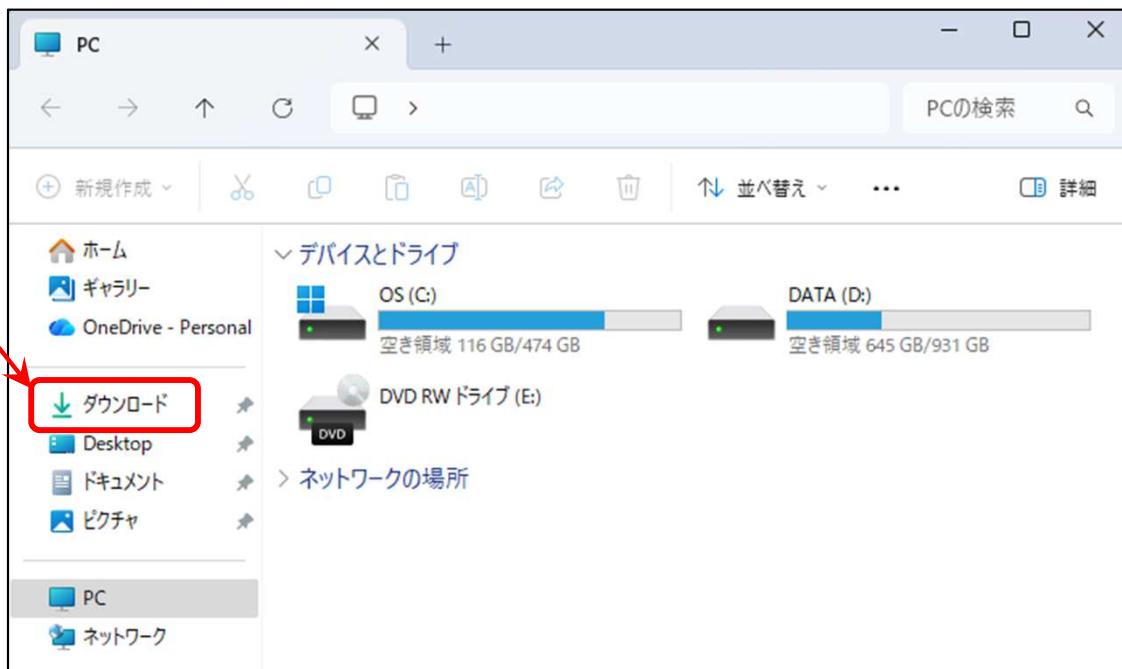

2. 『exocadv3.3.7z』を解凍する（※このファイルをUSBメモリなどに保管していただいてもかまいません）

ダウンロードフォルダー内にある『exocadv3.3.7z』にカーソルを当て右クリックします

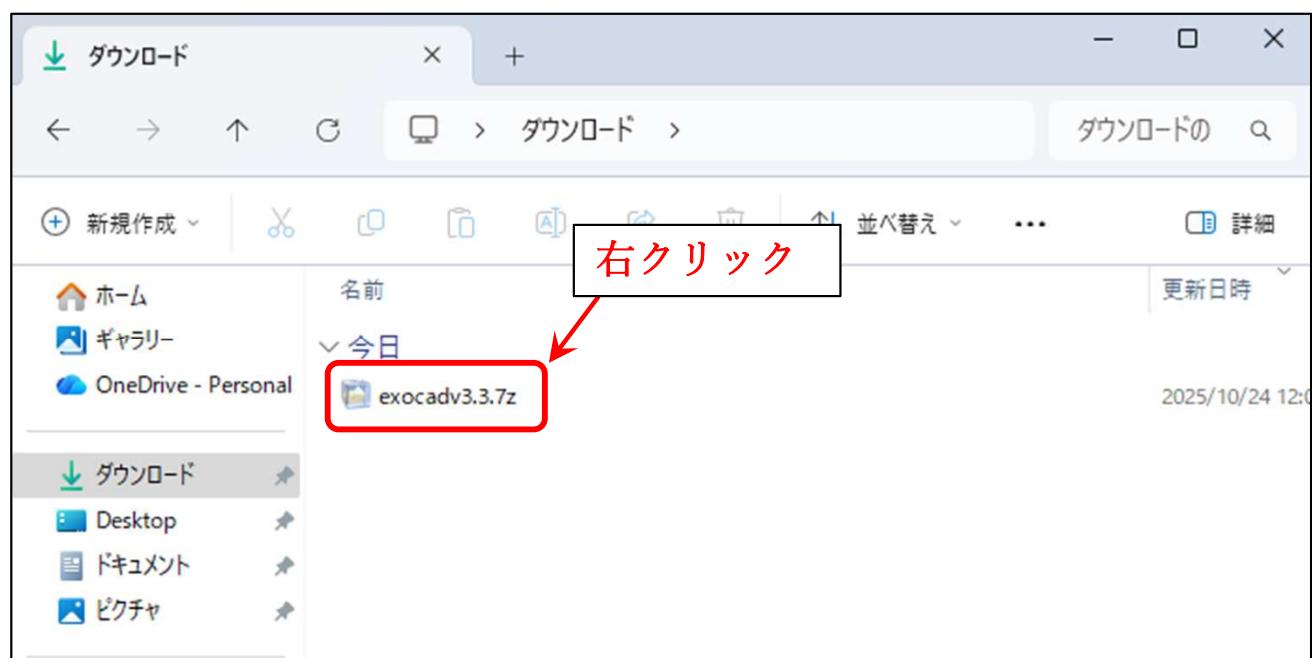


②ダウンロードファイルの解凍

3. メニュー内『その他のオプションを確認』をクリックし、
『7-Zip』→『ここに展開』をクリックします




4. 下記ウインドウが開き解凍がはじまります
※解凍が終わるまでパソコンに触れないでください。

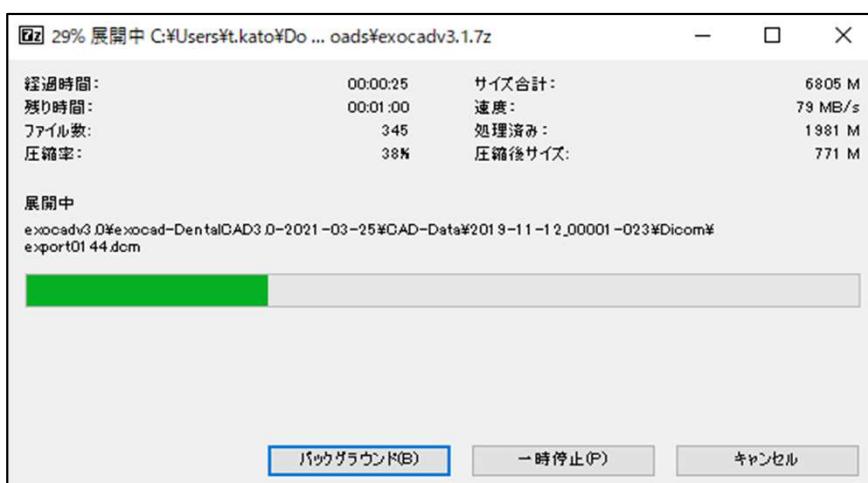

②ダウンロードファイルの解凍


5.解凍が終わると上記のウインドウが消え、ダウンロードフォルダに『exocadv3.3』のフォルダが出現します

※必ずしも『exocadv3.3.7z』の下に『exocadv3.3』のフォルダが出現するわけではありません。ダウンロードフォルダ内を探してください。

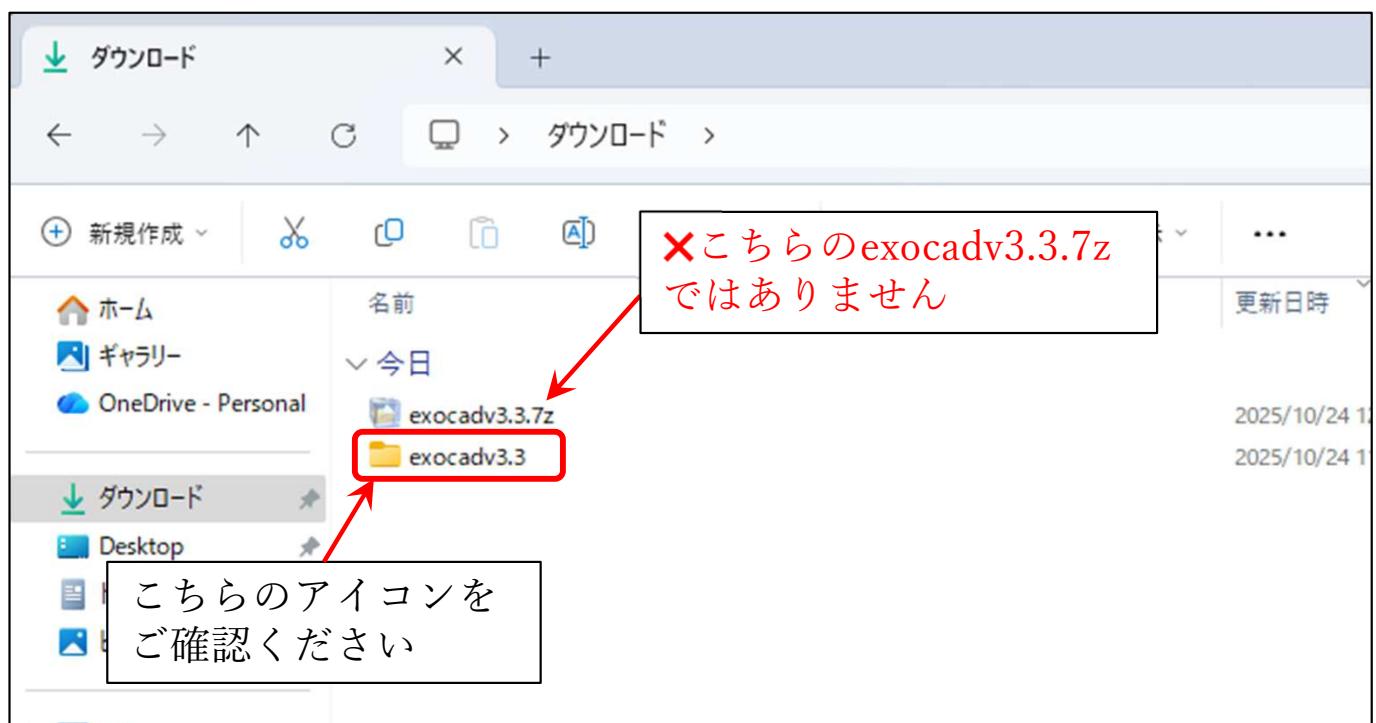


③exocadv3.3フォルダの移動

1. 『exocadv3.3』 のフォルダを『OS(C)』 へ移動してください

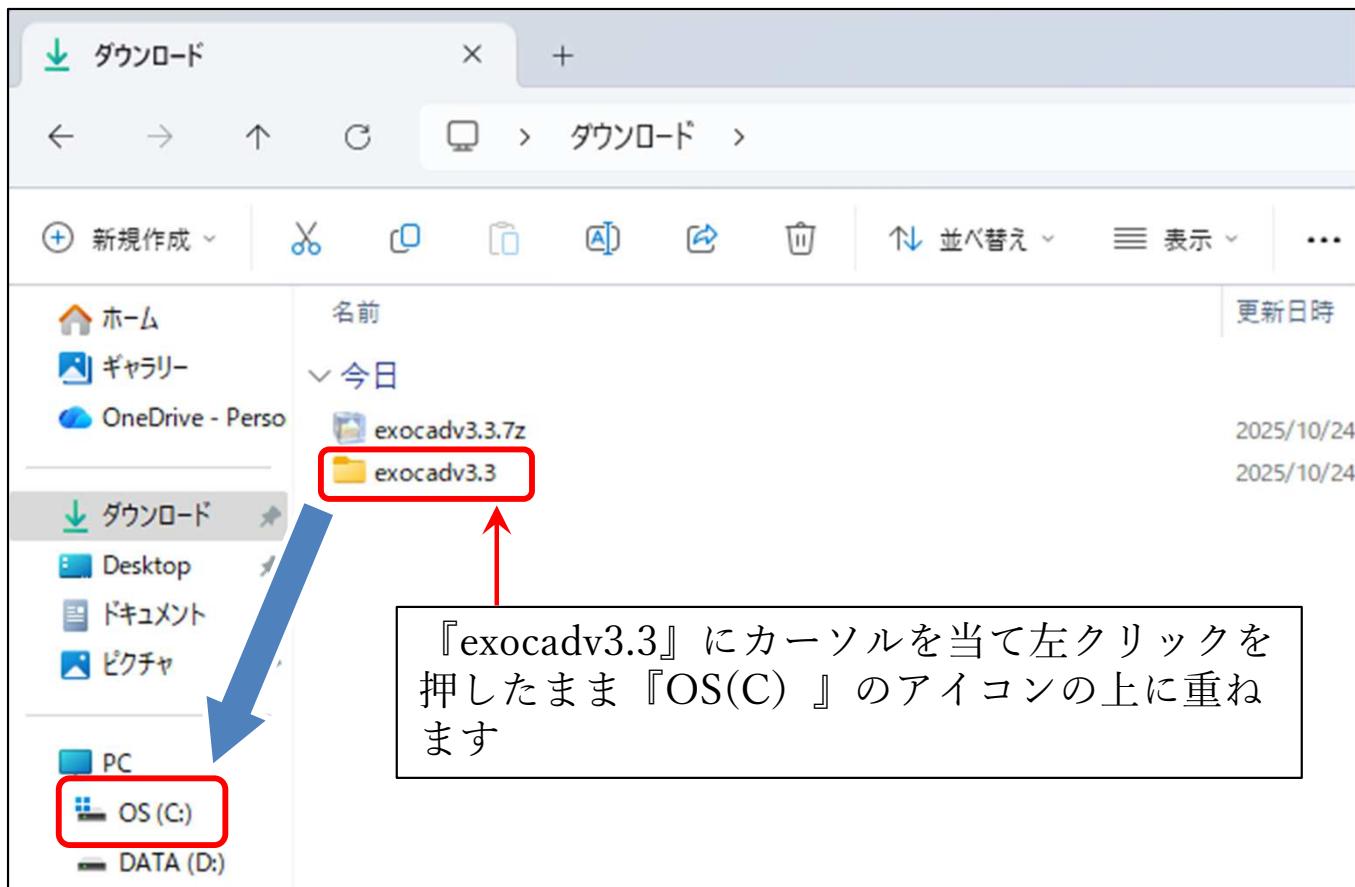


2. 『OS(C)』を開き『exocadv3.3』フォルダを確認します

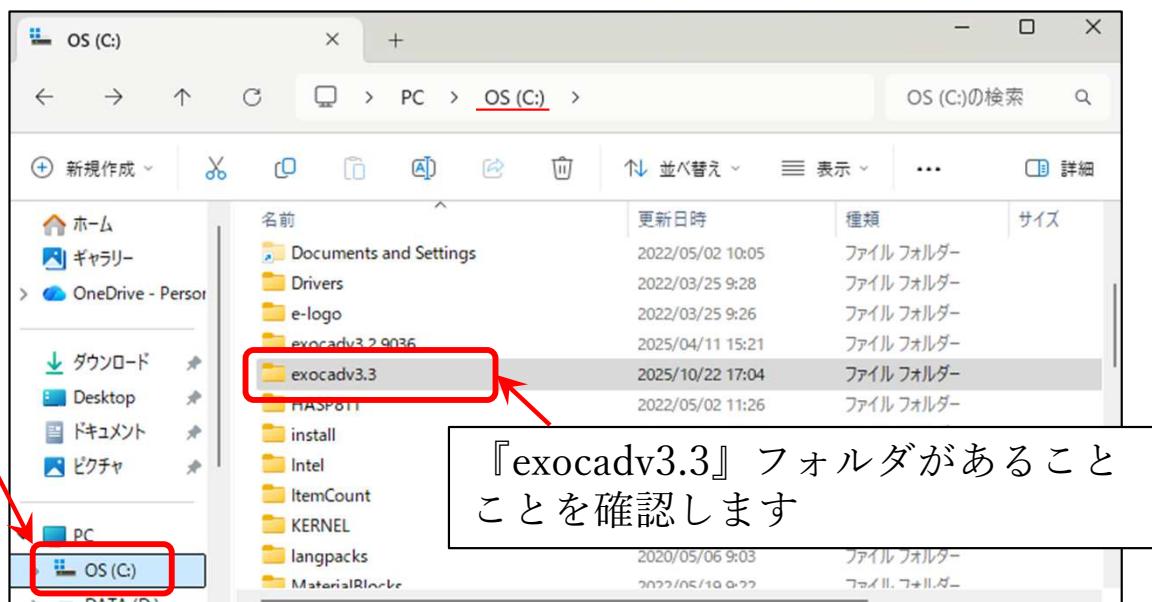


④ショートカットの作成

1.Cドライブの中『exocadv3.3』フォルダを開く

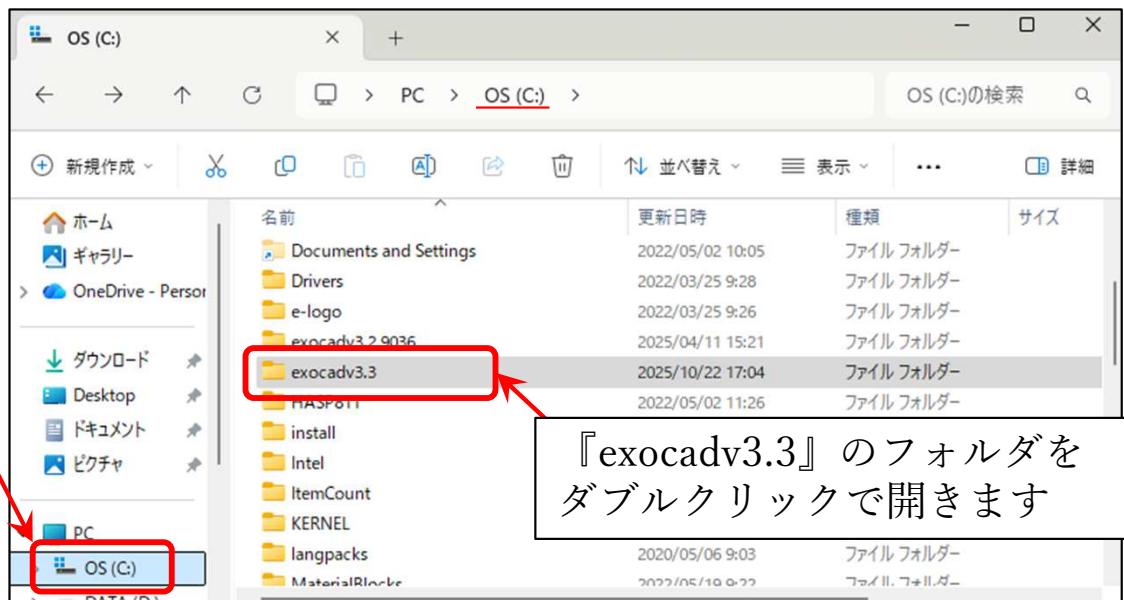

2.ショートカットをデスクトップに移動する


『exocadv3.3』『CAD-Datav3.3』『exocadv3.3マニュアル』のショートカットを移動します。下記写真と同じショートカットアイコンを左ドラッグでデスクトップへ移動します

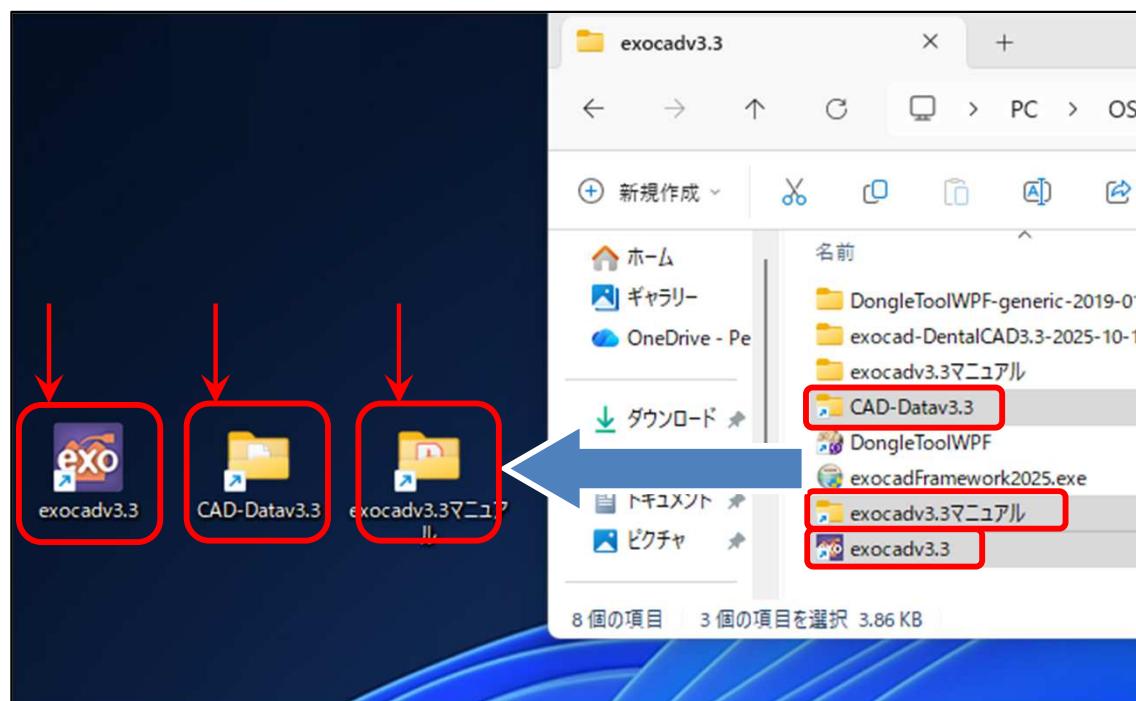


⑤※重要※exocadフレームワークのインストール

※重要：exocadFramework2025.exeをインストールしないとexocadv3.3は起動しません

- 1.『exocadv3.3』フォルダの中にある『exocadFramework2025.exe』をダブルクリックして起動します

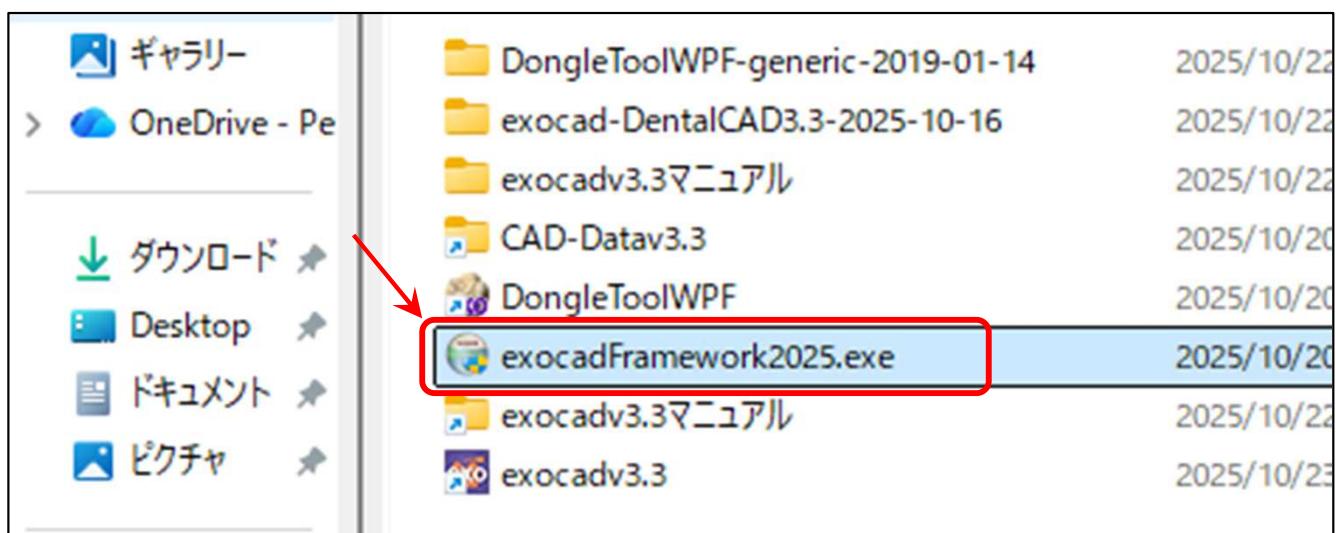


2. ウィザードが開くので『次へ(N)』をクリックします

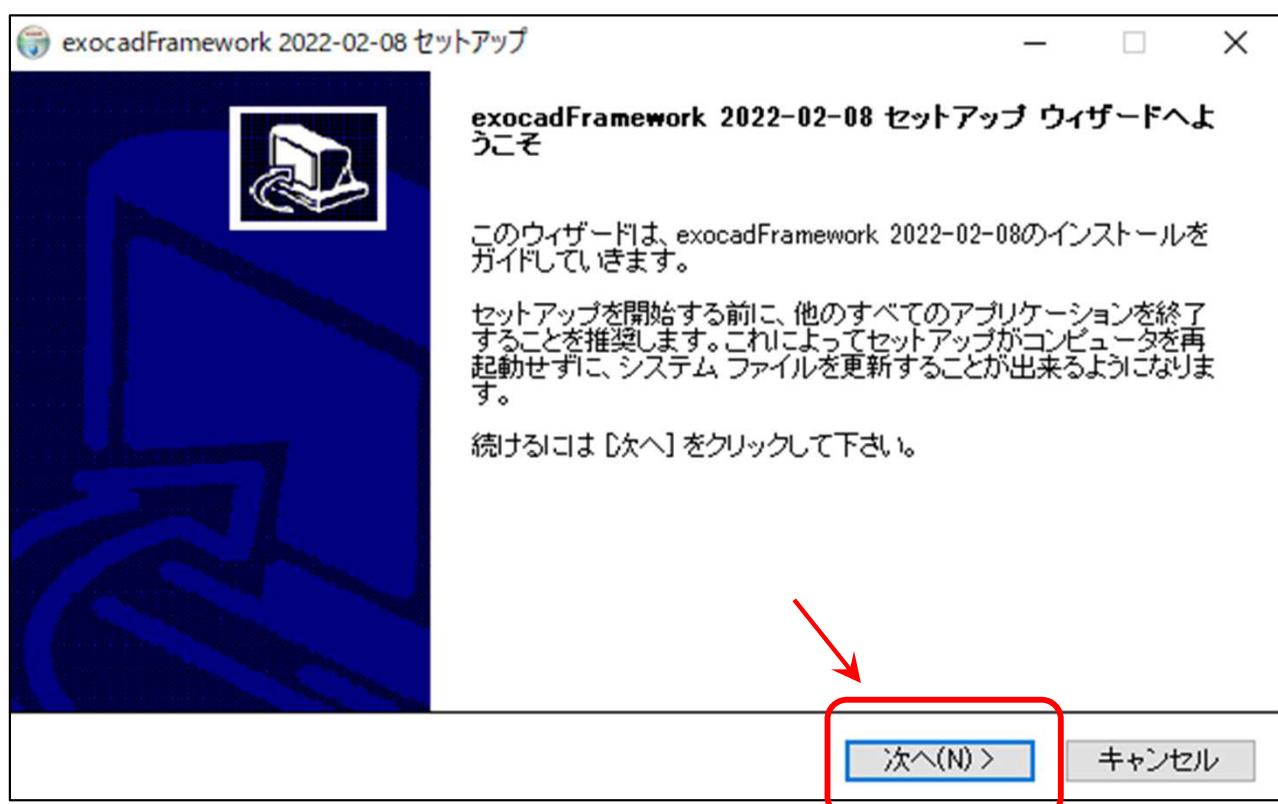


⑤exocadフレームワークのインストール

3. 次に『インストール』をクリックします

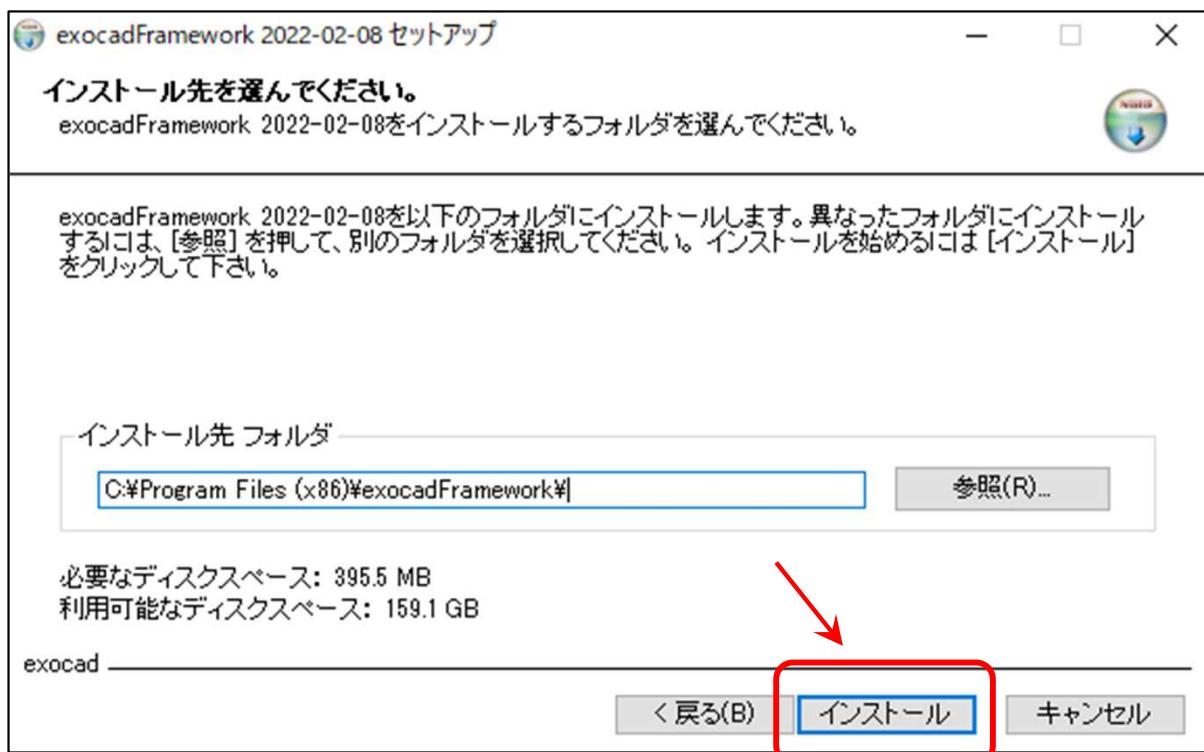


4. インストールが開始します。インストールが終わるまでパソコンに触れないでください。

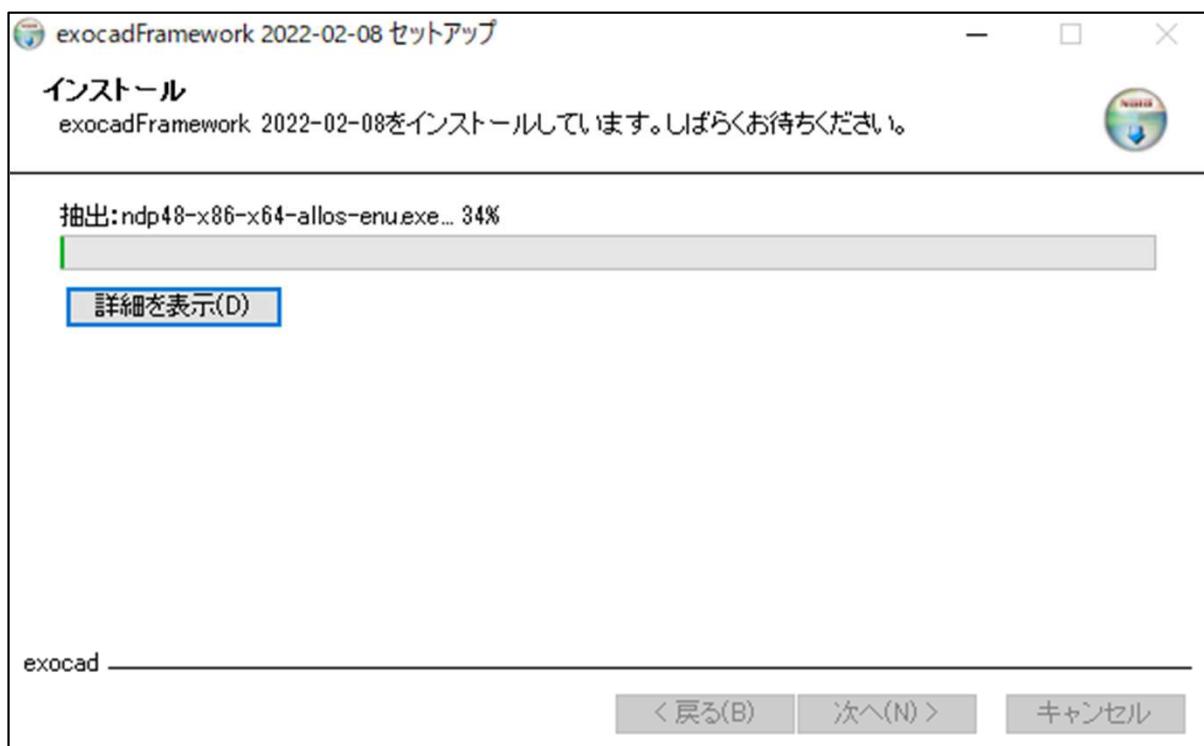

⑤exocadフレームワークのインストール

5. インストールが完了しました。『完了(F)』をクリックします

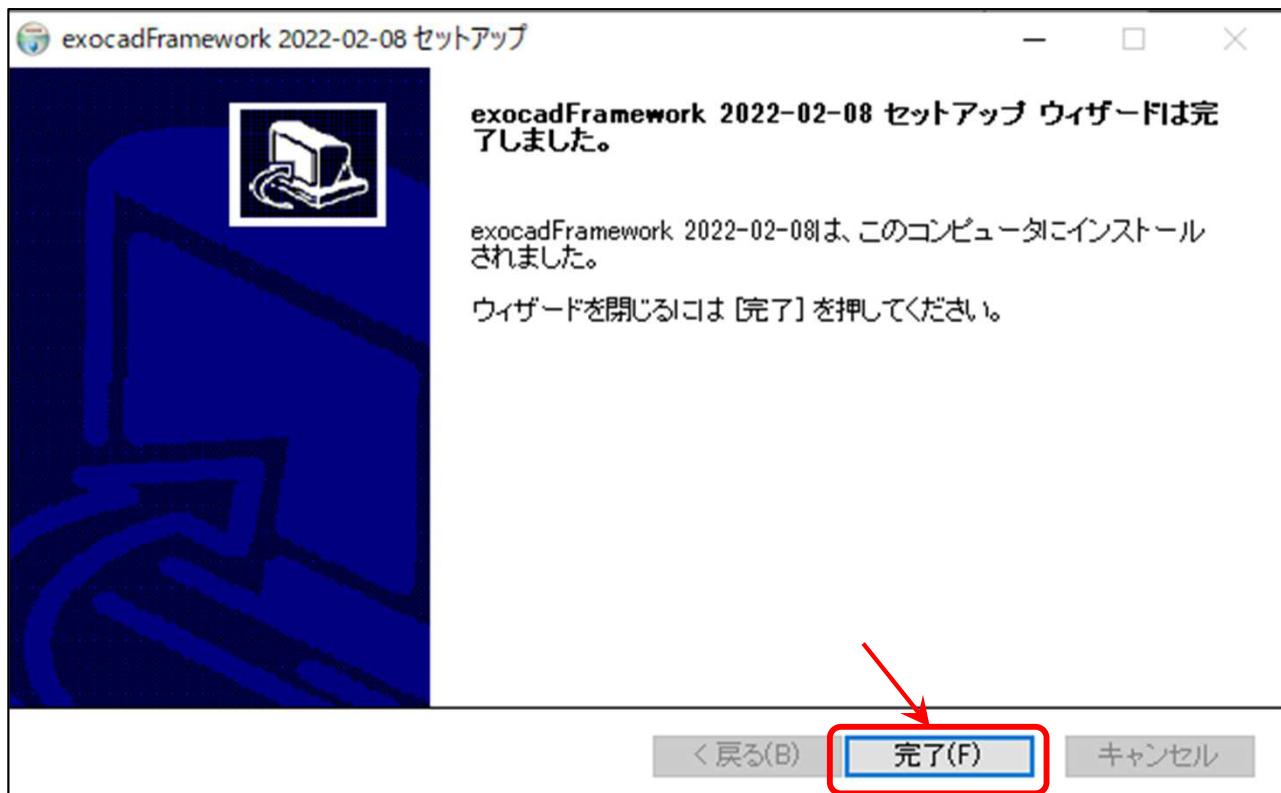

⑥my.exocad登録


my.exocadライセンスポータル登録について

「my.exocad」はユーザー情報を登録することにより、ライセンスを保護しソフトウェアの不正使用を防ぐ役目があります。

- ・新しいexocadv3.3 Chemnitzを使用するにはmy.exocadへのユーザー登録が必要です。登録、ログインにはインターネット接続が必要です。
- ・ライセンス検証の目的で、定期的なインターネットアクセスが必要です。ログイン後、6日間はインターネットに接続しない環境でも使用できますが、7日目以降はインターネットに接続して、再ログインする必要があります。**パソコンは常時インターネットに接続することをお勧めします。**

注意：exocadV3.0Galway以前のバージョンを使用する場合はmy.exocadポータルのログインは必要はありません。

1.exocadのショートカットをダブルクリックで開きます

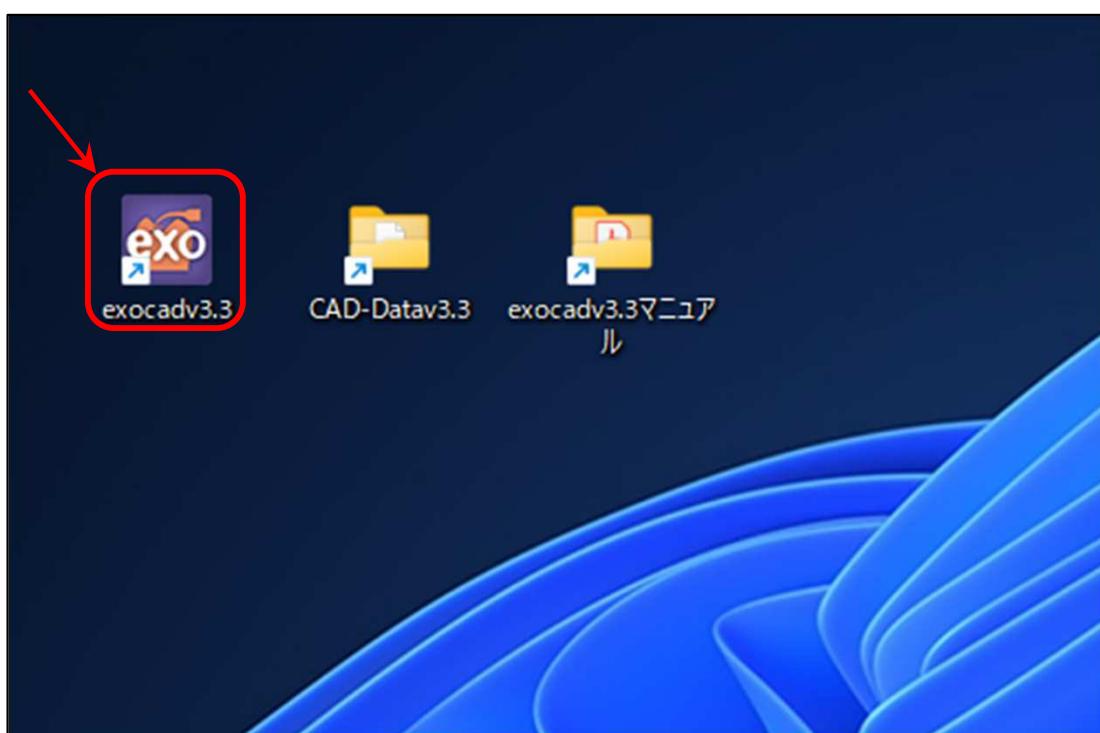

⑥my.exocad登録

2.my.exocadのログイン画面が表示されます。「登録する」をクリックします

my.exocadのログイン画面



3. 「登録する」をクリックするとインターネットが開きmy.exocadの登録画面が表示されます。

4. 登録するメールアドレスを入力して「続ける」をクリックします。



インターネット画面

メールアドレスはGoogleやYahoo、OCNなどのメールアドレスが使用できます
※国内携帯メールアドレスは使用できません。(@マークの後がdocomoやau、ezweb、softbankなど)

⑥my.exocad登録

5.登録したメールアドレスの受信箱に（アドレスnoreply-ciam@aligntech.com）から下記のようなメールが届きます。
届いた承認コードを入力して「確認する」をクリックします

exocad

メールアドレスを認証してください

User 先生

認証コード: **623789** ※認証コードの有効期限は1時間です。

利用規約 | 会社概要 (インプリント) | プライバシーポリシー

exocad

メールを認証する

確認コードを送信しました。コードを入力してアカウントにアクセスしてください。

メールアドレス
ta.sato@ci-medical.com

確認コード
623789

確認する

確認コードを受信していませんか？再送信 戻る

ログインまたは登録を続行することで、**my.exocad** 利用規約に同意したことになります。my.exocad があなたのデータをどのように取り扱うかについては、**プライバシーポリシー**をご覧ください。

メール画面参考
(メールソフトにより表示に違いがあります)

5.パスワードを設定入力して「アカウント作成」をクリックします

exocad

ようこそ

新しいアカウントの認証情報を選択してください。

メールアドレス*
ta.sato@ci-medical.com

パスワード*

パスワードには次の文字が必要です。

- ・長さ 8 文字以上
- ・次のうち少なくとも 3 種類:
 - ・小文字 (a-z)
 - ・大文字 (A-Z)
 - ・数字 (0-9)
 - ・特別文字 (例 !@#\$%^&*)
- ・同じ文字の連続は 2 回まで

アカウントを作成

パスワードは

- ・長さ 8 文字以上
- ・小文字、大文字、数字、特別文字から 3 種類を使用
- ・同じ文字の連続は 2 回まで
- ・パスワードの例 Abcd@123

⑥my.exocad登録

6.個人情報を入力してください（日本語入力可、登録した内容は変更できます）

*マークは必須項目です

7.入力が終わったら『継続する』をクリックして、続きの情報も入力してください。

個人データ

メールアドレス
ta.sato@ci-medical.com

敬称（任意）

名*

姓*

基礎言語
やまと (変更しません)

生年月日

居住地の地理的位置*

プレフィックス 固定電話

プレフィックス 携帯電話

継続する

個人データ

役職 / 組織

私の職業

職務 * 技工所：管理者を選択します

会社との関係 * オーナーまたはジェネラルマネージャーを選択します

組織/企業/機関データ

組織/企業/機関名*

番地 * 自宅番号

郵便番号 * 都市 *

地理的位置 *

私はここにexocadニュースレターを受け取ることに同意します。

私は利用規約に同意し、プライバシーに関する通知を読んで理解しています。*

← 戻る 登録

利用規約 インプリント プライバシー通知 お問い合わせ
バージョン: 1.10.2

8.利用規約・プライバシー通知の同意にチェックしてください


9.『登録』をクリックして完了です

⑥my.exocad登録

7. 登録したメールアドレスとパスワードを入力して『ログイン』をクリックします
※5回連続で入力を間違えると5分間ロックされます。5分後にやり直してください




8. ログインすると個人情報入力ページが開きます

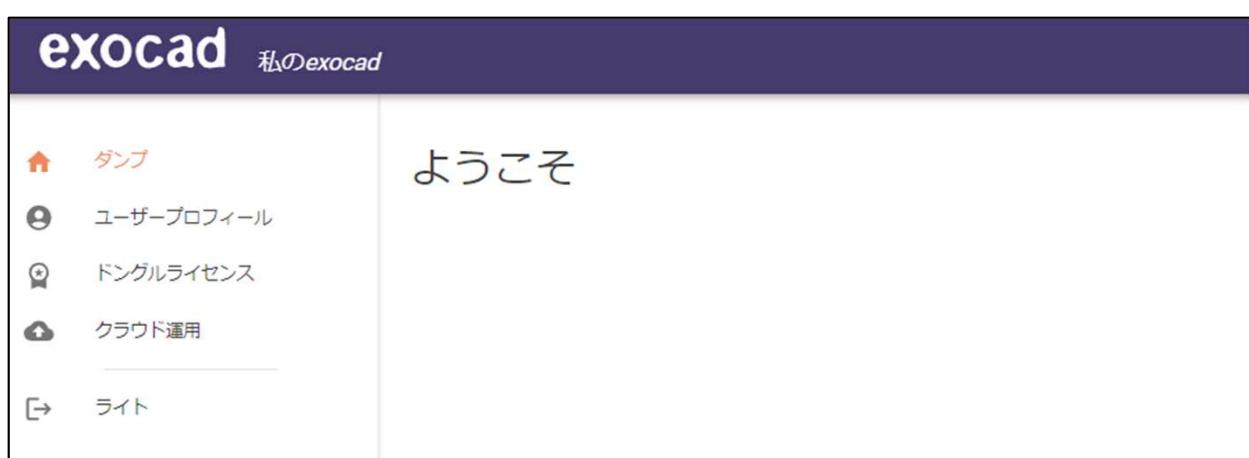

⑥my.exocad登録

16. 『exocadv3.3』をダブルクリックしてexocadを起動します

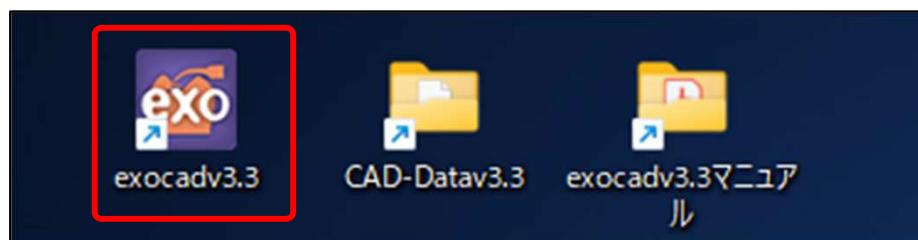

17. メールアドレスとパスワードを入力して『ログイン』をクリックするとexocadが起動します

※5回連続で入力を間違えると5分間ロックされます。5分後にやり直してください



- ・ログイン期限はインターネットに接続した状態での最終ログイン日から6日間です。
- ・7日間以上exocadを起動しなかった場合は自動ログアウトされます。
- ・インターネットを切断した状態で使用している場合も、同様に7日目にログアウトされます。