

# 重要!

## パソコンとソフトウェアを ご利用いただく際の注意事項

2025.4

Ciメディカルのパソコンを導入、またはお客様所有のパソコンで  
弊社のIOS・CADCAMソフトウェアをご利用いただく際の注意事項

1. 直射日光に当たる所、湿気の多いところには設置しないでください。  
火気水濡厳禁です。
2. パソコンの通気口は塞がないでください。  
排熱が行えず故障の原因となる可能性があります。
3. デスクトップ本体は床に直接置かないでください。  
埃が内部に溜まりやすく故障の原因になります。
4. パソコンは、有線LANによるインターネット接続が必須です。  
Wi-fi接続の場合、ソフトウェアの更新やインストール作業が実施できないほか、  
遠隔サポートが円滑に提供できなくなります。
5. ウイルス対策ソフトをインストールしないでください。  
歯科用ソフトが起動しなくなる場合があります。
6. 弊社から導入したパソコンに他社製のソフトウェアはインストールしないでください。  
ソフト同士が干渉し、正常に起動しなくなる事があります。
7. 他社製の歯科用ソフトがインストールされているパソコンには、  
弊社の歯科用ソフトをインストールできません。



### Ciメディカルからのお願い

IOS・CADCAM用パソコンは歯科用ソフトを利用するため  
ウイルス対策ソフトをインストールしていません。  
ウイルス感染のリスクを避けるため、以下の事はお控えください。

- NG** 不用なインターネットの検索やホームページの閲覧
- NG** 業務以外のファイルやアプリのダウンロードやインストール
- NG** 業務以外のメールの開封や添付ファイルのダウンロード
- NG** 無料Wi-fiの利用



パソコンのスペックシートをご用意しております。  
お客様がパソコンをご準備される場合はお問い合わせ下さい。